




MANUAL DE INSTRUCCIONES



Somos Lup,

Facilitamos la lectura,
convertimos texto en voz.

Ayudamos a ganar autonomía a las personas con dificultades para leer. Ofrecemos soluciones de lectura asistida orientadas a aportar autonomía y facilitar el día a día a personas con dificultades de lectura.

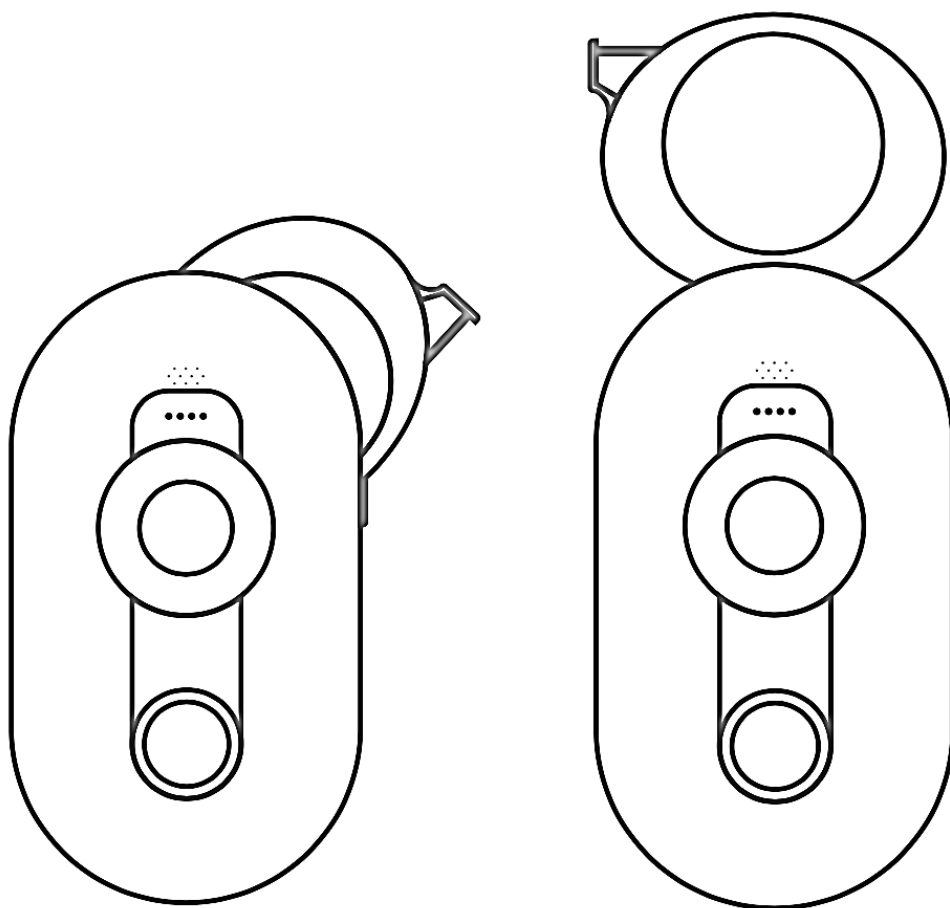

Índice


Modelo Classic

Introducción a la lupa	01
Guía de uso rápido	04
Descripción del producto	05
Puesta en marcha	09
Garantía límite	11

Modelo Classic

Gracias por comprar nuestro dispositivo, la Lupa Inteligente. Nuestra guía rápida actualmente admite castellano e inglés. Nos disculpamos si su idioma preferido no está disponible.

El manual completo para este dispositivo podrás encontrarlo también en formato pdf desde el siguiente QR o nuestro sitio web www.lup.es/tutoriales

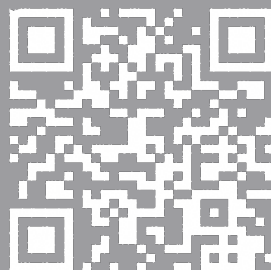





Modelo Classic

Instrucciones en vídeo

¡Escanéame con el móvil!

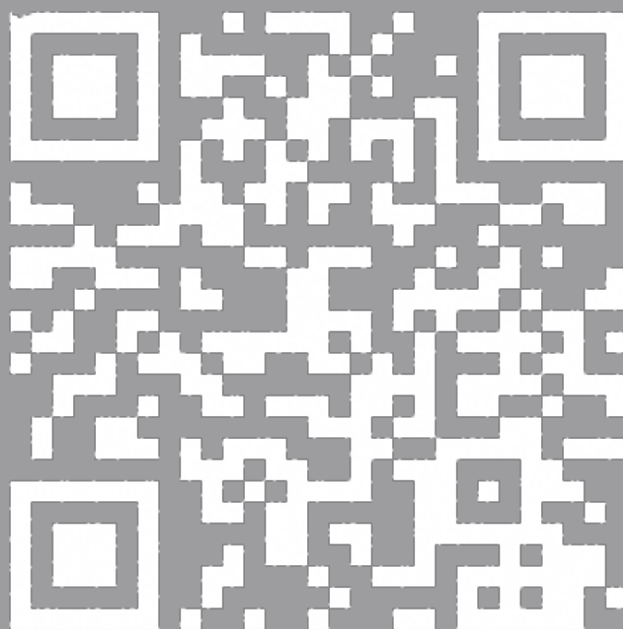

Guía de uso rápido

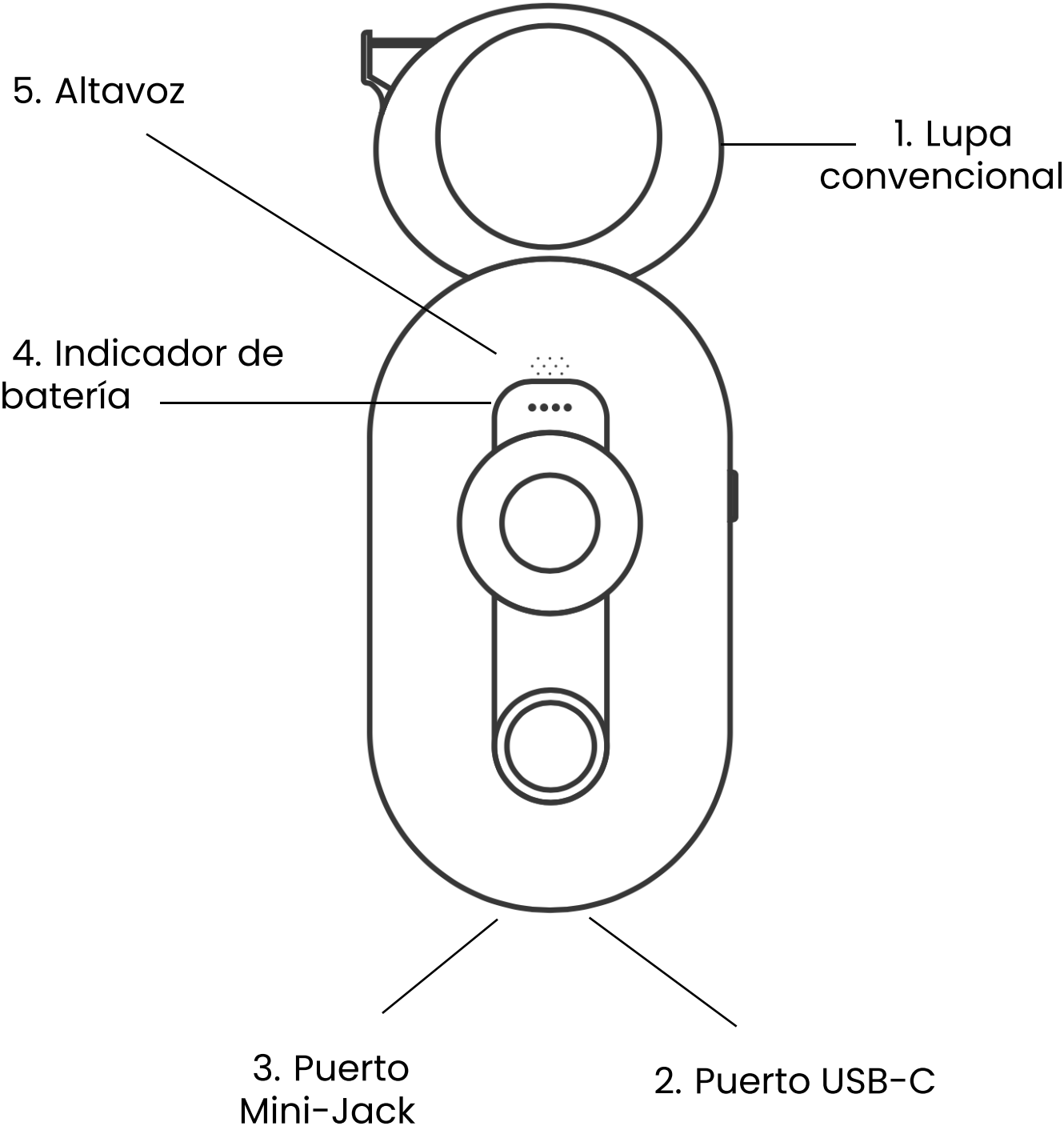

Descripción del producto

Resumen

El modelo Classic de las lupas, es un modelo fácil y muy intuitivo de usar. Convierte el texto a voz instantáneamente, consta de hasta 4 idiomas de lectura disponibles, navegación sobre texto, velocidad de voz regulable y una lente con aumento de x10.


Todas las lupas contienen: un cargador/enchufe, un cable de cargador USB-C y un adaptador de Mini-Jack a Jack

Número	Pulsación corta	Pulsación larga
B1	Capturar	Menú
B2	Pausa/Reanudar	Modo navegación
B3	Avanzar	Aumentar velocidad de reproducción
B4	Rebobinar	Reducir velocidad de reproducción
B5	Subir volumen	-
B6	Bajar volumen	-

Descripción del producto

Pulsación corta


La lupa ostenta de 2 modos de funcionamiento: la corta y la larga. Mediante la pulsación se pueden ejecutar diferentes acciones en ella. En este apartado, se explican las acciones posibles a realizar mediante la pulsación corta.

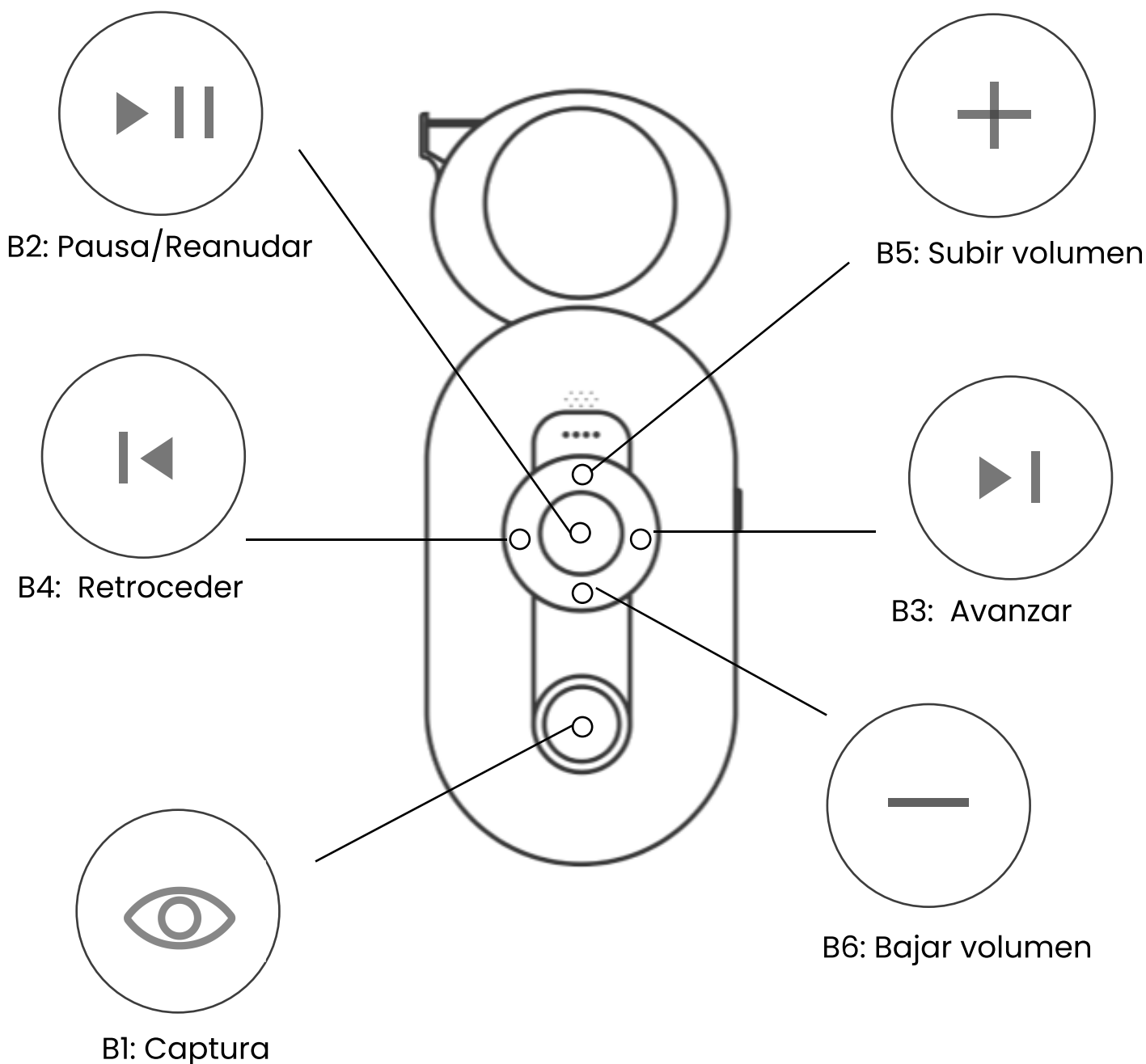

Descripción del producto


Pulsación larga

La lupa ostenta de 2 modos de funcionamiento: la corta y la larga. Mediante la pulsación se pueden ejecutar diferentes acciones en ella. En este apartado, se explican las acciones posibles a realizar mediante la pulsación larga.

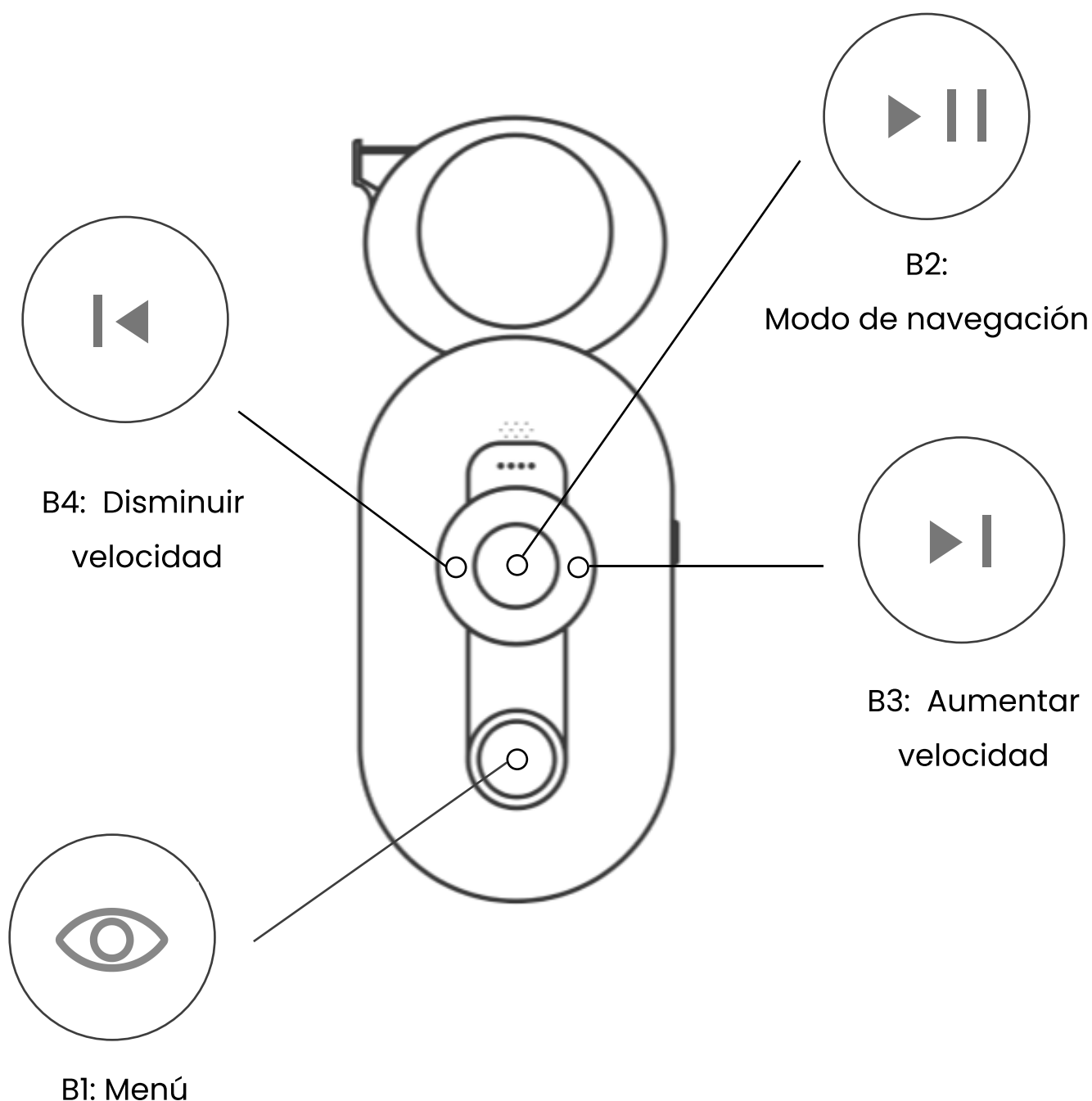


Lupa convencional

La Lupa Inteligente incorpora también una lupa convencional, a partir de ahora (lente), con el que el usuario podrá seguir utilizando el resto visual. Para hacer uso de la lente de aumento tira de la pestaña del lado derecho de la lupa. La lente es de x10 aumentos.

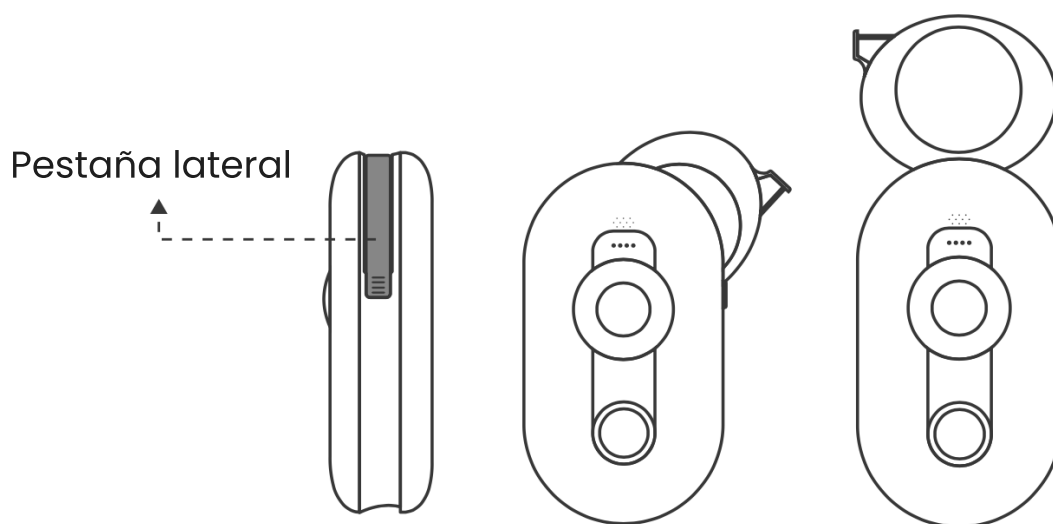


Carga de batería

Para cargar la batería del dispositivo inteligente deberá unir el cable que encontrará en la caja al cabezal que también encontrará en la caja. Conecta el cable al dispositivo y enchufa el cabezal a la toma de corriente.

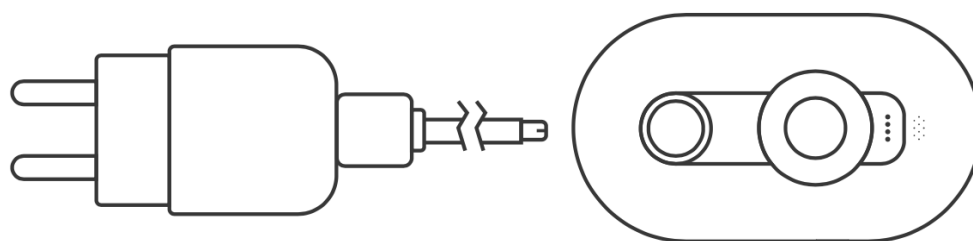


Los puntos que se encuentran en la parte superior del dispositivo indicaran el nivel de batería. Una luz siendo batería baja y cuatro puntos de luz siendo batería totalmente cargada.

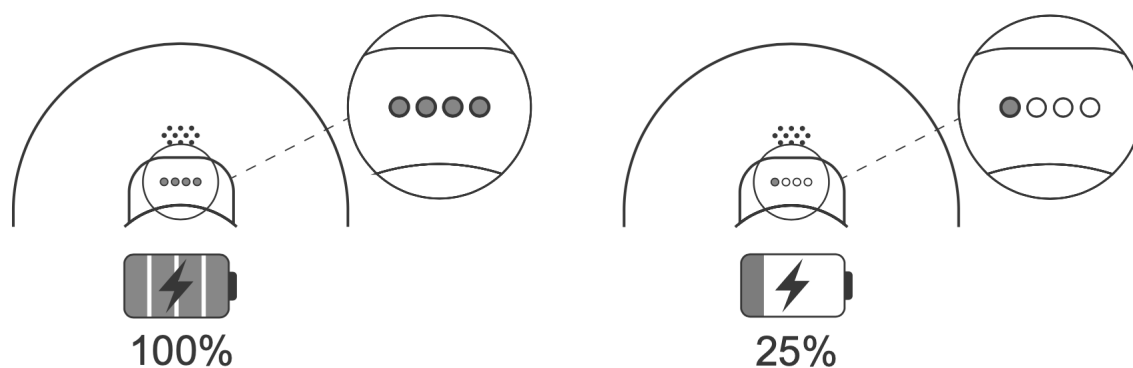

Puesta en marcha


Encender

Para encender el dispositivo pulsa el botón de captura (B1) manteniéndolo durante cinco segundos. Las luces superiores te indicarán que este encendido. Seguido deberá sonar la siguiente frase "listo para capturar".

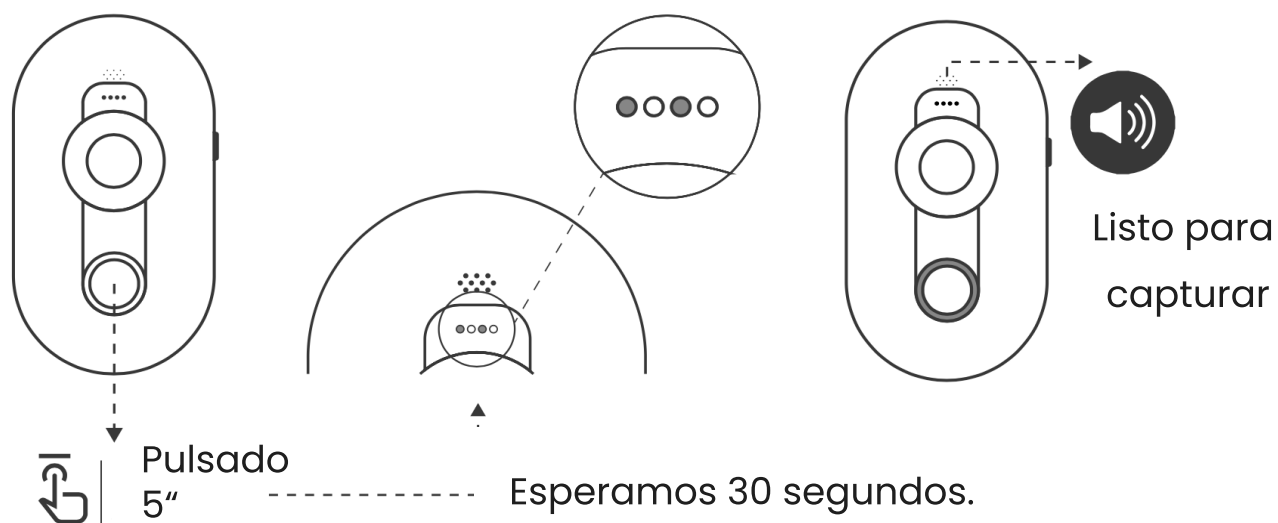

Capturar

Posiciona la lupa enfrente del texto y pulsa el botón de captura (B1). Seguido, el dispositivo emitirá un sonido de captura, seguido un pitido de “check”. Espera hasta el segundo pitido para retirar el dispositivo y escuchar el texto.

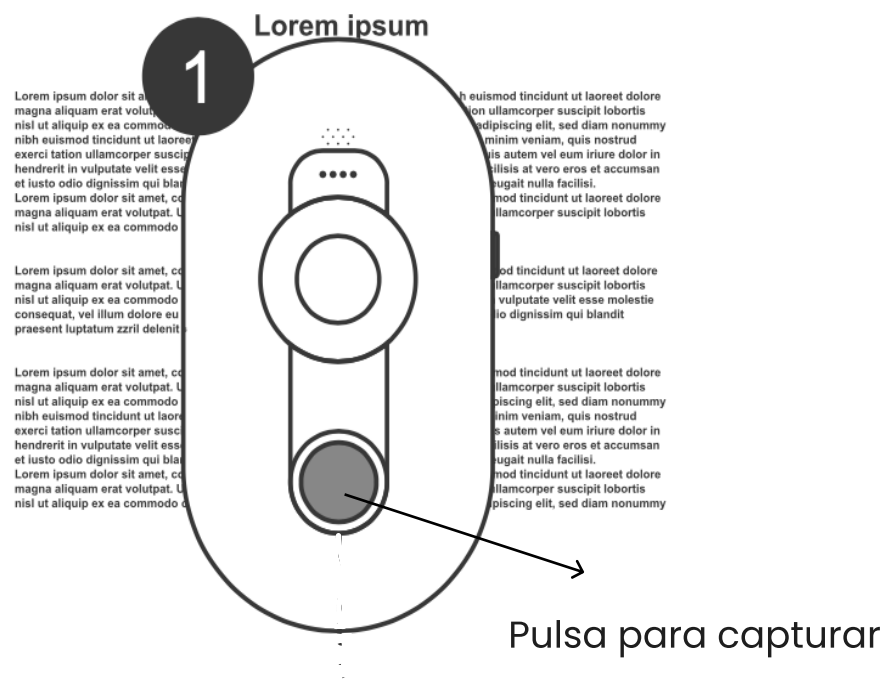

Información de seguridad

- No intentar desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el original de LUP, incluido en la caja.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permiten dispositivos inalámbricos.
- Mantener el dispositivo alejado del agua, fuego, polvo, humedad o ambientes calientes.
- No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

Garantía límite

Lup garantiza que este dispositivo esté libre de defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es limitada e intransferible, es solo para usted, el primer comprador usuario final. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra y tiene una duración 2 años para productos adquiridos en el continente europeo.



LUP

Lup S.Coop Txikia, Paseo Miramon 170 3º,
20014, San Sebastian, Spain



www.lup.es © 2025
Lup S.Coop. All rights reserved.





www.lup.es




MANUAL DE INSTRUCCIONES



Somos Lup,

Facilitamos la lectura,
convertimos texto en voz

Ayudamos a ganar autonomía a las personas con dificultades para leer. Ofrecemos soluciones de lectura asistida orientadas a aportar autonomía y facilitar el día a día a personas con dificultades de lectura.

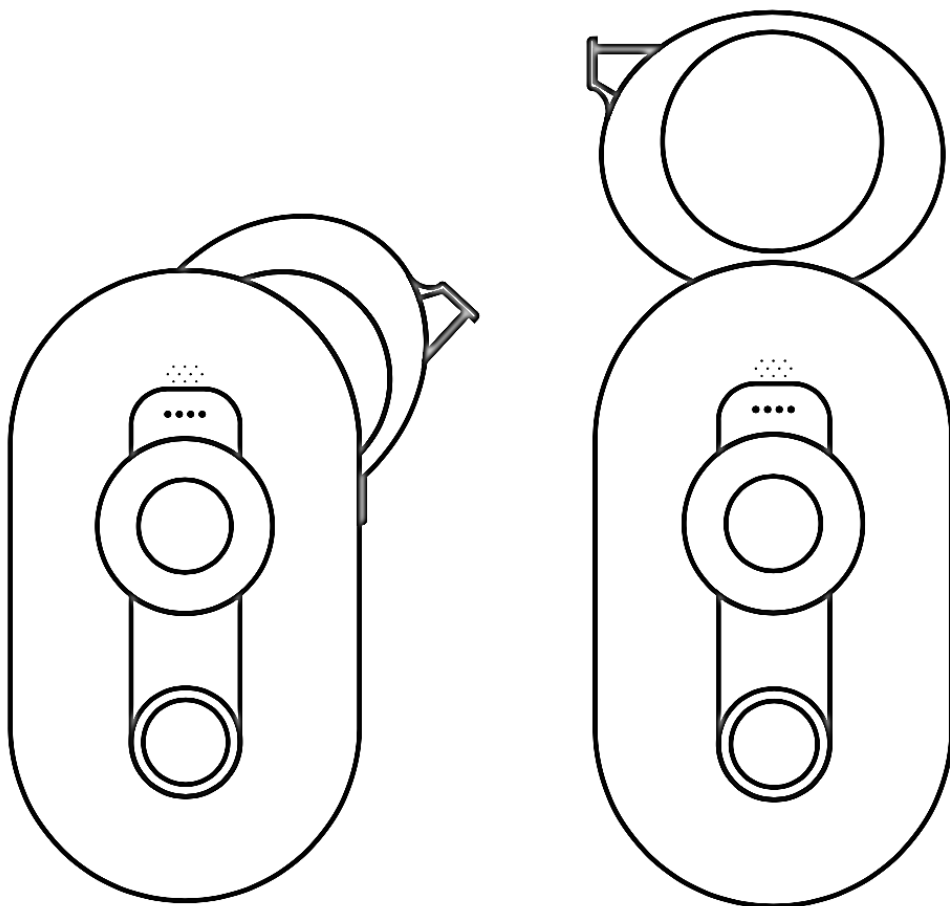

Índice


Modelo Advanced

Introducción a la lupa	01
Guía de uso rápido	04
Descripción del producto	05
Asistente de captura	08
Puesta en marcha	10
Garantía límite	12

Modelo Advanced

Gracias por comprar nuestro dispositivo, la Lupa Inteligente. Nuestra guía rápida actualmente admite castellano e inglés. Nos disculpamos si su idioma preferido no está disponible.

El manual completo para este dispositivo podrás encontrarlo también en formato pdf desde el siguiente QR o nuestro sitio web www.lup.es/tutoriales.

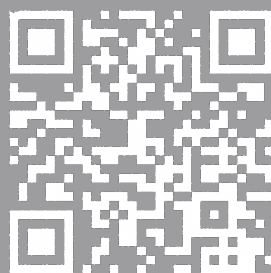





Modelo Advanced

Instrucciones en vídeo

¡Escanéame con el móvil!

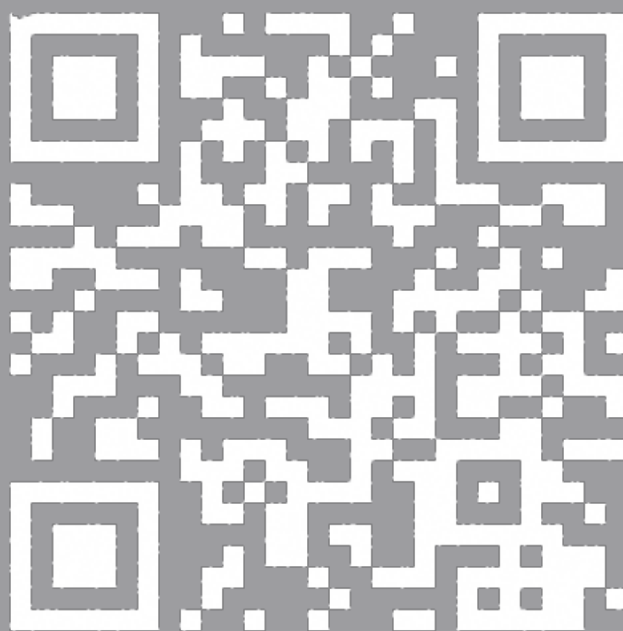

Guía de uso rápido

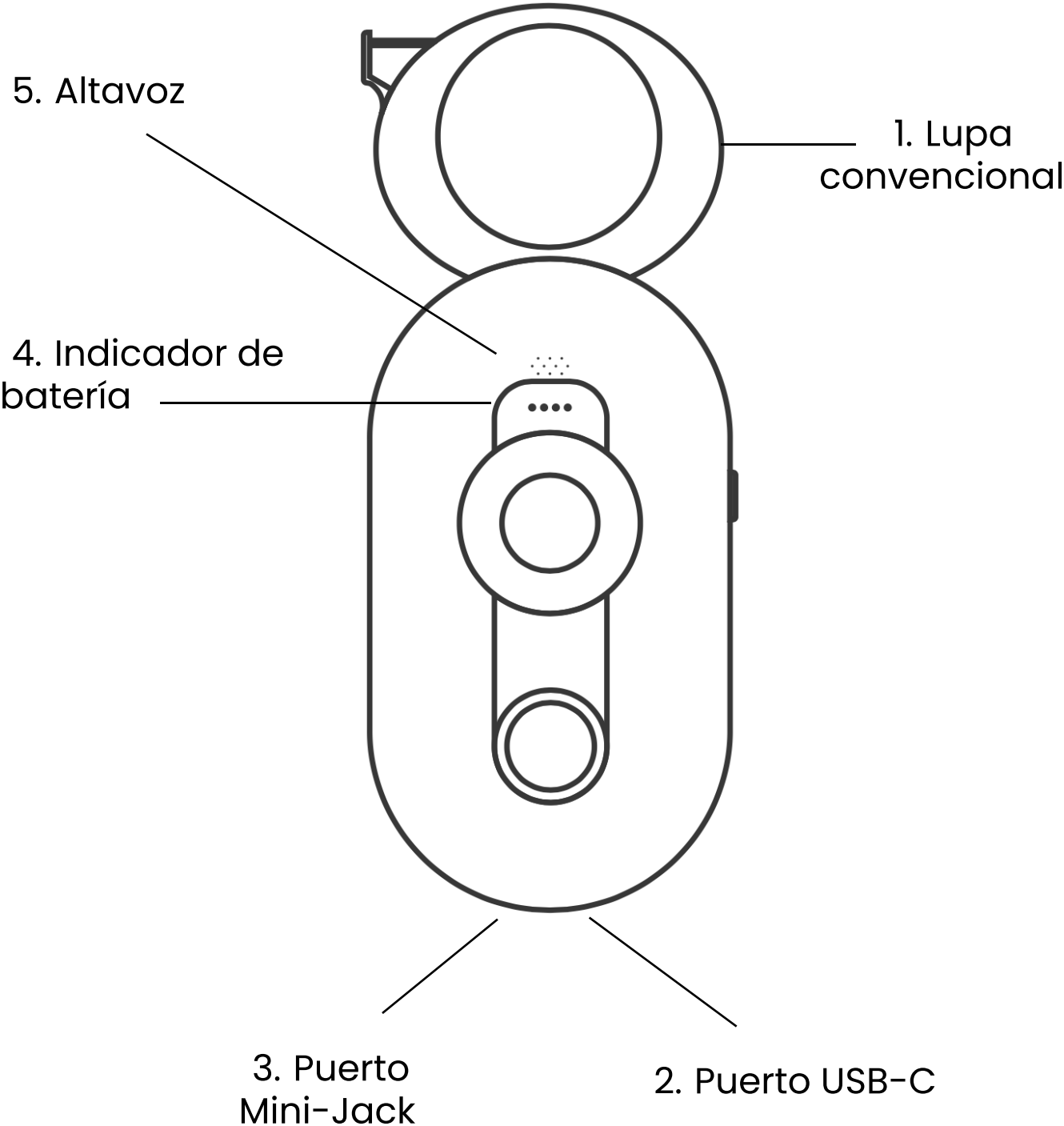

Descripción del producto

Resumen

El modelo Advanced de las lupas, es un modelo fácil y muy intuitivo de usar. Convierte el texto a voz instantáneamente, consta de hasta 6 idiomas de lectura disponibles, navegación sobre texto, asistente inteligente en captura y una lente con aumento de x10.


Todas las lupas contienen: un cargador/enchufe, un cable de cargador USB-C y un adaptador de Mini-Jack a Jack

Número	Pulsación corta	Pulsación larga
B1	Capturar	Menú
B2	Pausa/Reanudar	Modo navegación
B3	Avanzar	Aumentar velocidad de reproducción
B4	Rebobinar	Reducir velocidad de reproducción
B5	Subir volumen	-
B6	Bajar volumen	-

Descripción del producto

Pulsación corta


La lupa ostenta de 2 modos de funcionamiento: la corta y la larga. Mediante la pulsación se pueden ejecutar diferentes acciones en ella. En este apartado, se explican las acciones posibles a realizar mediante la pulsación corta.

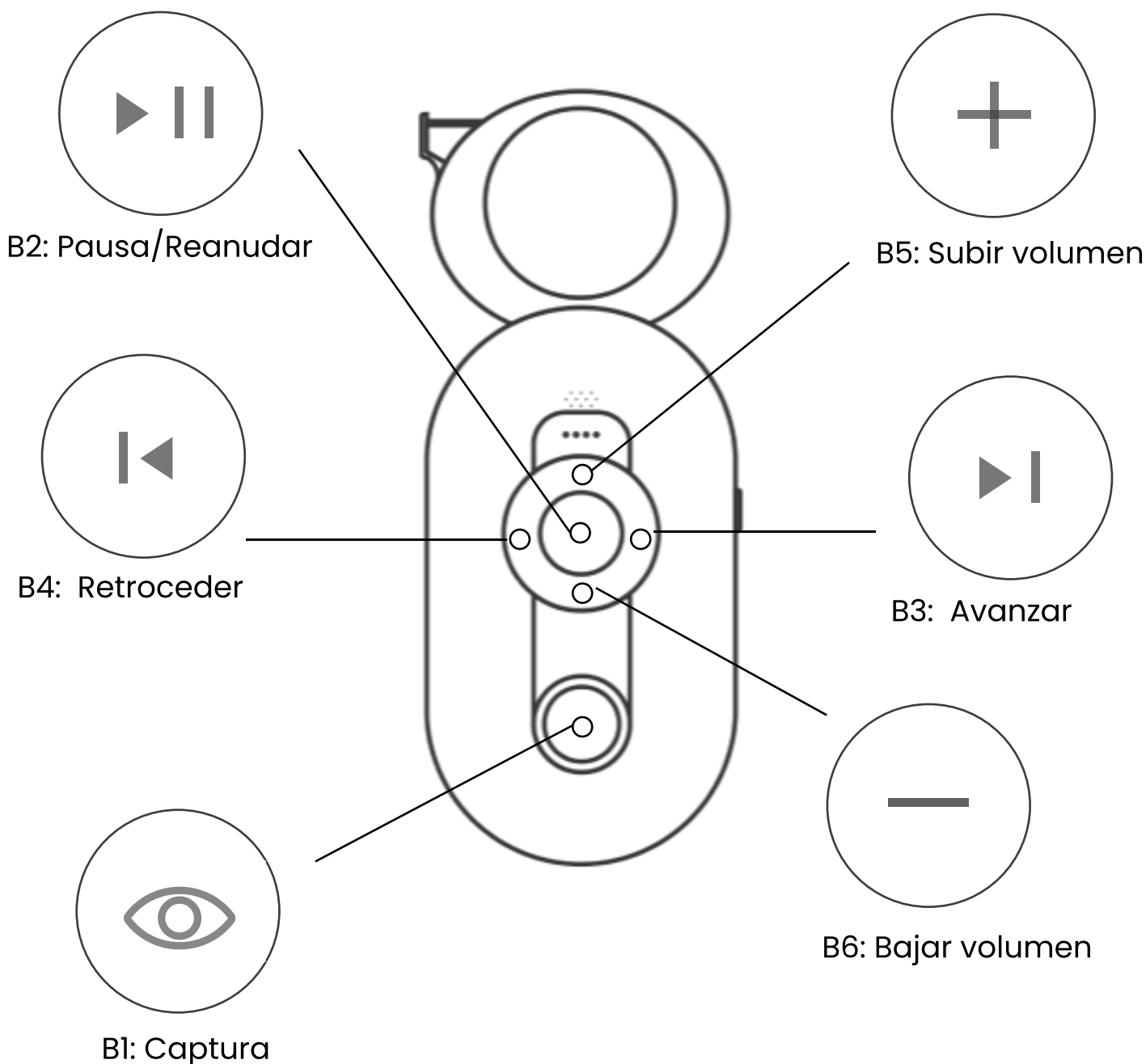

Descripción del producto

Pulsación larga

La lupa ostenta de 2 modos de funcionamiento: la corta y la larga. Mediante la pulsación se pueden ejecutar diferentes acciones en ella. En este apartado, se explican las acciones posibles a realizar mediante la pulsación larga.

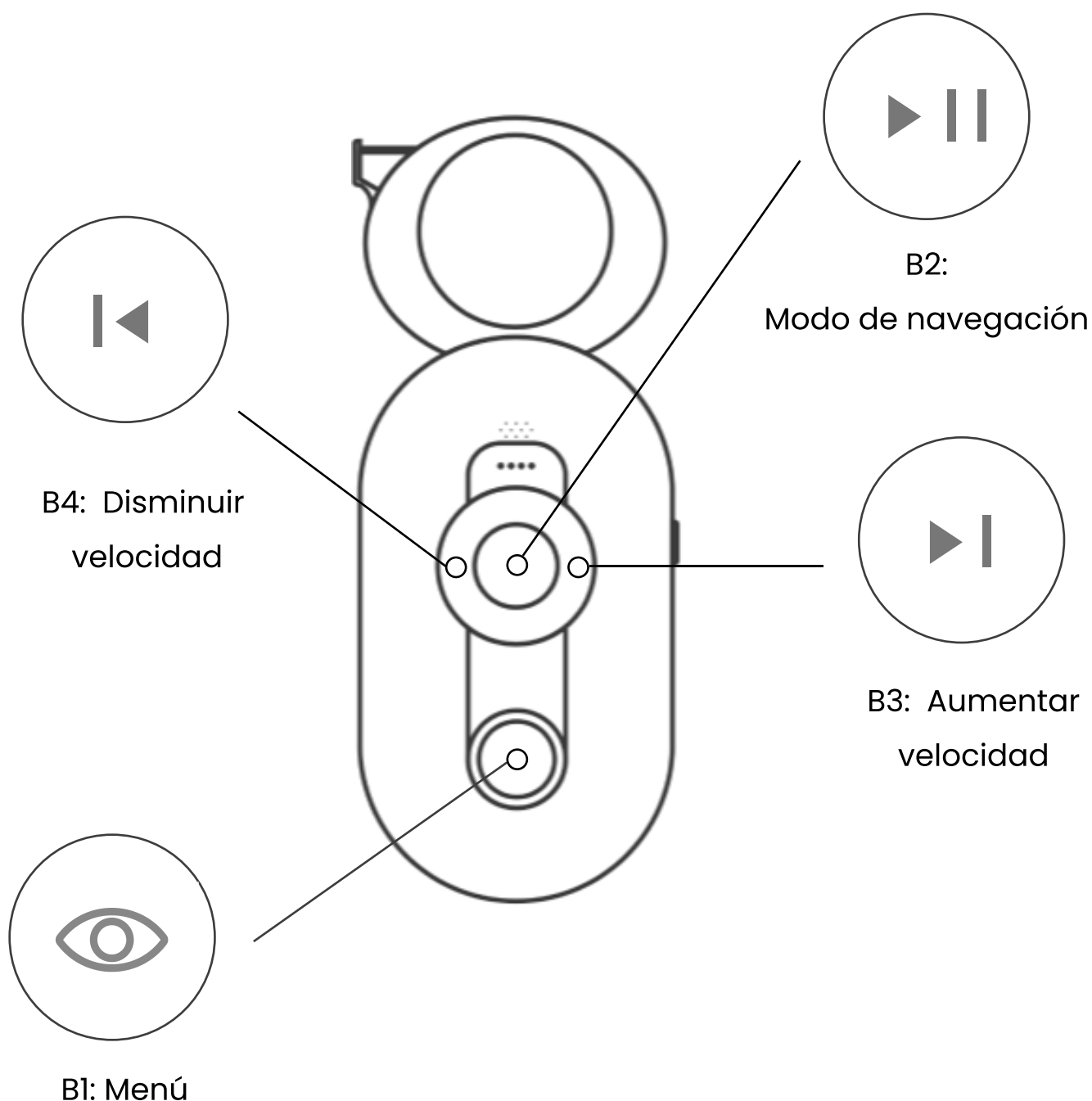


Asistente de captura

El asistente de captura integrada en la Lupa Inteligente emite sonidos cuando detecta texto mientras se desliza sobre una superficie. Se podrá activar desde el menú como se explica previamente. Cuando el dispositivo pasaba por encima de un texto, el dispositivo emitía un sonido si no existe texto no se emitirá ningún sonido. Esto permitirá identificar la ubicación del texto.


Lupa convencional

La Lupa Inteligente a continuación (dispositivo) incorpora también una lupa convencional, a partir de ahora (lente), con el que el usuario podrá seguir utilizando el resto visual. Para hacer uso de la lente de aumento tira de la pestaña del lado derecho de la lupa. La lente es de x10 aumentos.

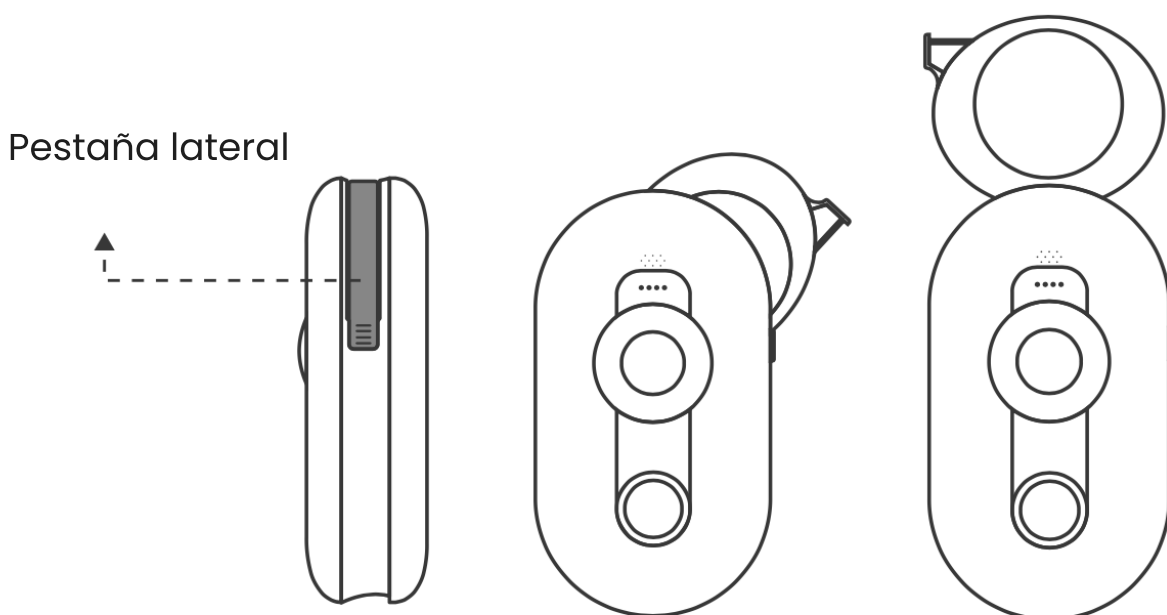


Carga de batería

Para cargar la batería del dispositivo inteligente deberá unir el cable que encontrará en la caja al cabezal que también encontrará en la caja. Conecta el cable al dispositivo y enchufa el cabezal a la toma de corriente.

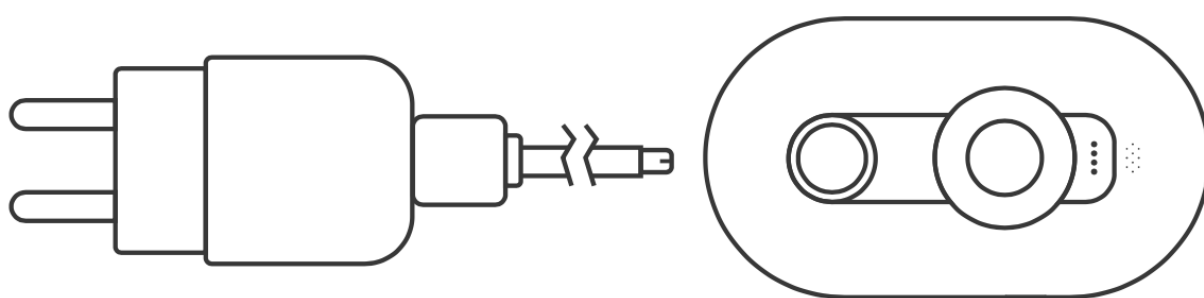


Los puntos que se encuentran en la parte superior del dispositivo indicaran el nivel de batería. Una luz siendo batería baja y cuatro puntos de luz siendo batería totalmente cargada.

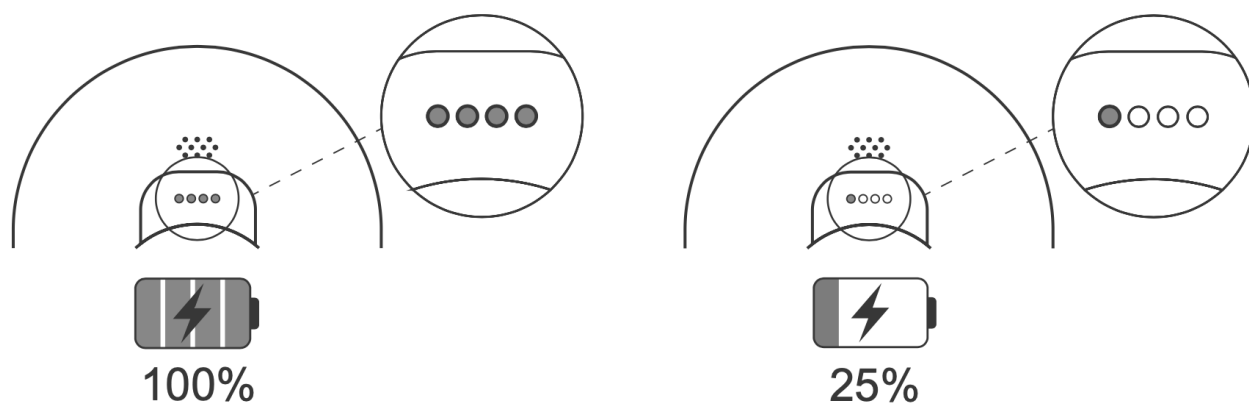

Puesta en marcha


Encender

Para encender el dispositivo pulsa el botón de captura (B1) manteniéndolo durante cinco segundos. Las luces superiores te indicarán que este encendido. Seguido deberá sonar la siguiente frase "listo para capturar".

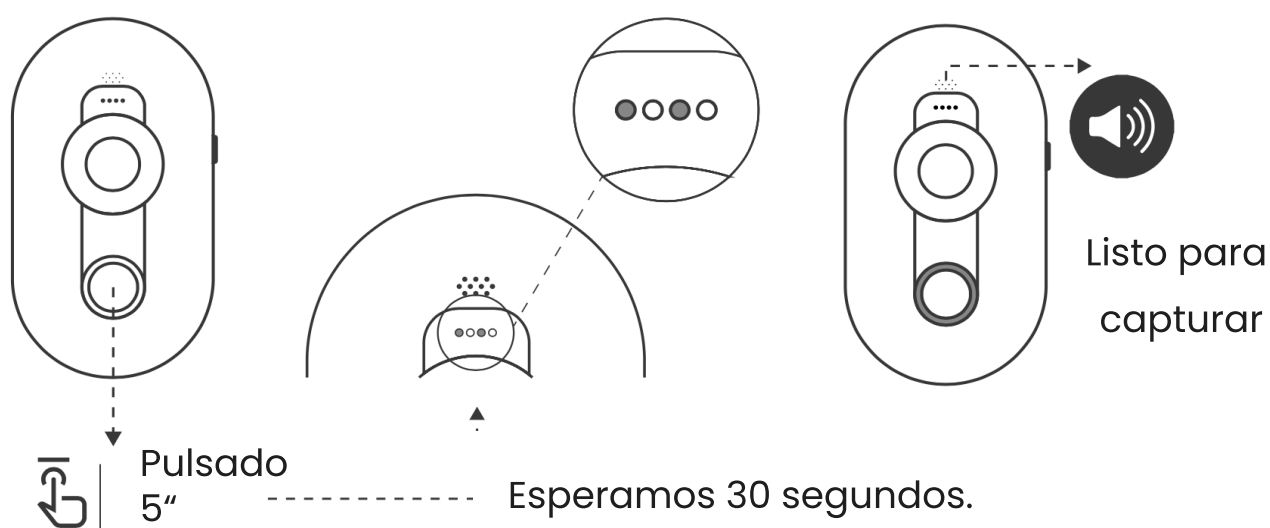

Capturar

Posiciona la lupa enfrente del texto y pulsa el botón de captura (B1). Seguido, el dispositivo emitirá un sonido de captura, seguido un pitido de "check". Espera hasta el segundo pitido para retirar el dispositivo y escuchar el texto.

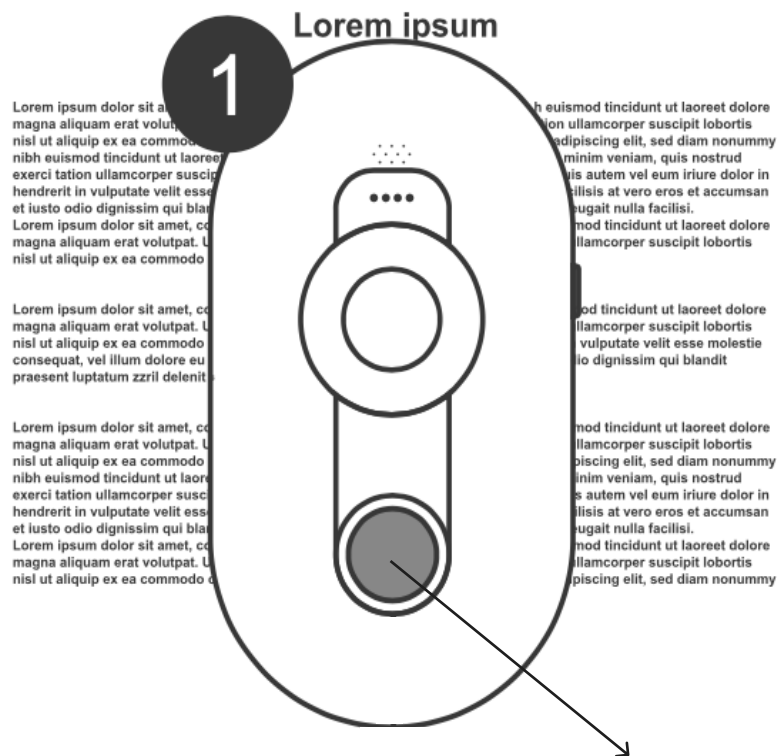


Pulsa para capturar

Información de seguridad

- No intentar desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el original de LUP, incluido en la caja.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permiten dispositivos inalámbricos.
- Mantener el dispositivo alejado del agua, fuego, polvo, humedad o ambientes calientes.
- No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

Garantía límite

Lup garantiza que este dispositivo esté libre de defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es limitada e intransferible, es solo para usted, el primer comprador usuario final. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra y tiene una duración 2 años para productos adquiridos en el continente europeo.

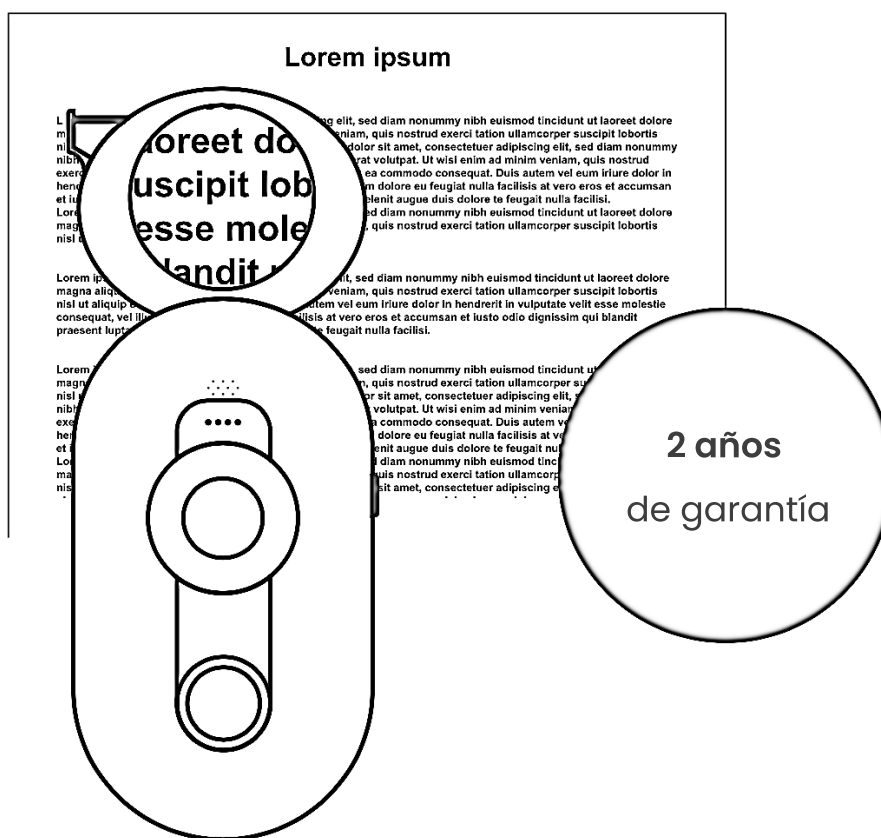

LUP

Lup S.Coop Txikia, Paseo Miramon 170 3º,
20014, San Sebastian, Spain



www.lup.es © 2025
Lup S.Coop. All rights reserved.





www.lup.es




MANUAL DE INSTRUCCIONES



Somos Lup,

Facilitamos la lectura,
convertimos texto en voz

Ayudamos a ganar autonomía a las personas con dificultades para leer. Ofrecemos soluciones de lectura asistida orientadas a aportar autonomía y facilitar el día a día a personas con dificultades de lectura.

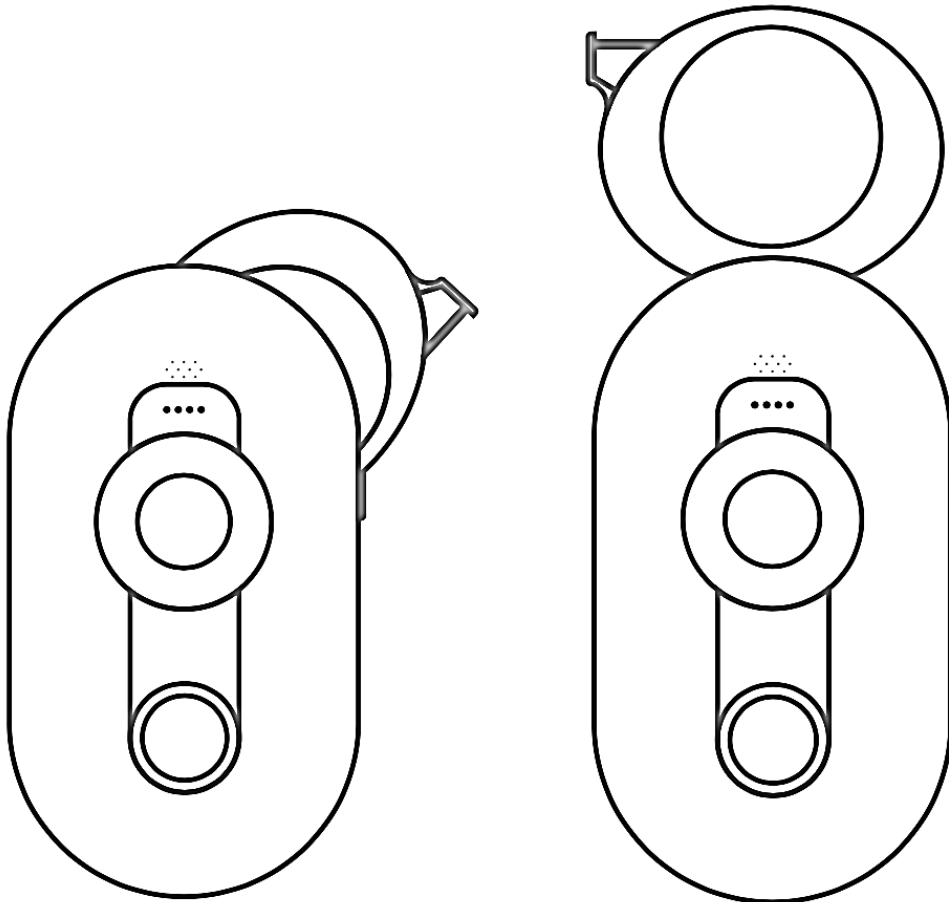

Índice


Modelo Profesional

Introducción a la lupa	01
Guía de uso rápido	04
Descripción del producto	05
Puesta en marcha	10
Garantía límite	12

Modelo Profesional

Gracias por comprar nuestro dispositivo, la Lupa Inteligente. Nuestra guía rápida actualmente admite castellano e inglés. Nos disculpamos si su idioma preferido no está disponible.

El manual completo para este dispositivo podrás encontrarlo también en formato pdf desde el siguiente QR o nuestro sitio web www.lup.es/tutoriales.

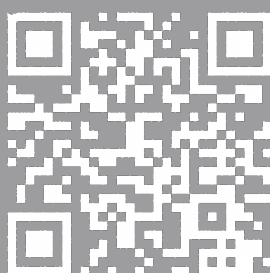





Modelo Professional

Instrucciones en vídeo

¡Escanéame con el móvil!

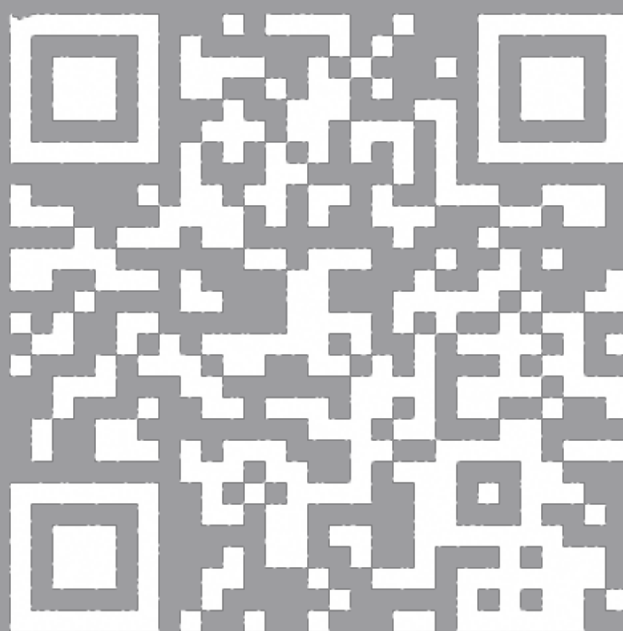

Guía de uso rápido

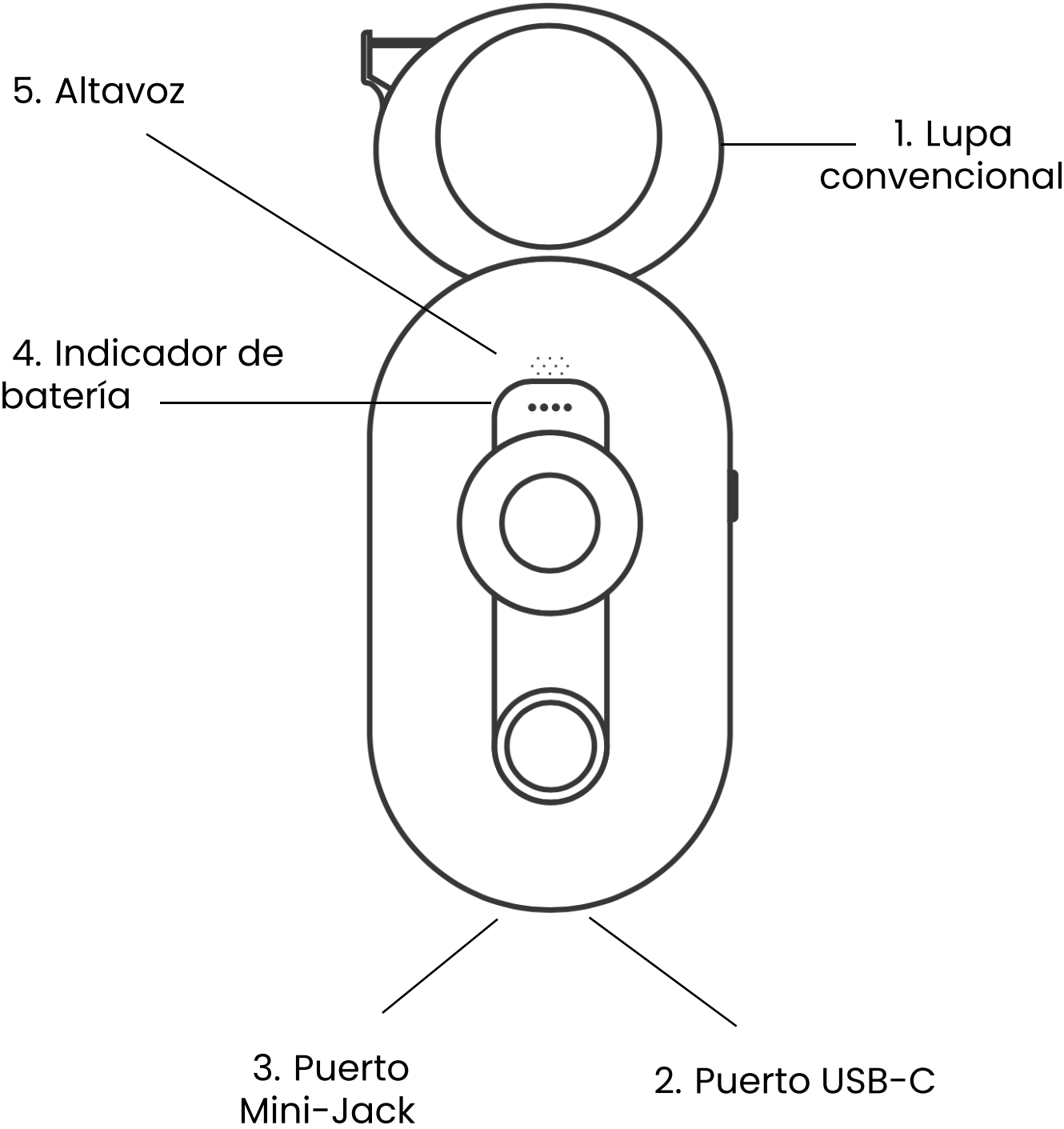

Descripción del producto

Resumen

El modelo Professional de las lupas, es un modelo fácil y muy intuitivo de usar. Convierte el texto a voz instantáneamente, tiene una traducción instantánea, una lectura de más de 30 idiomas, conectividad Bluetooth, asistente inteligente en captura y lente con aumento de x10.


Todas las lupas contienen: un cargador/enchufe, un cable de cargador USB-C y un adaptador de Mini-Jack a Jack

Número	Pulsación corta	Pulsación larga
B1	Capturar	Menú
B2	Pausa/Reanudar	Modo navegación
B3	Avanzar	Aumentar velocidad de reproducción
B4	Rebobinar	Reducir velocidad de reproducción
B5	Subir volumen	-
B6	Bajar volumen	-

Descripción del producto

Pulsación corta


La lupa ostenta de 2 modos de funcionamiento: la corta y la larga. Mediante la pulsación se pueden ejecutar diferentes acciones en ella. En este apartado, se explican las acciones posibles a realizar mediante la pulsación corta.

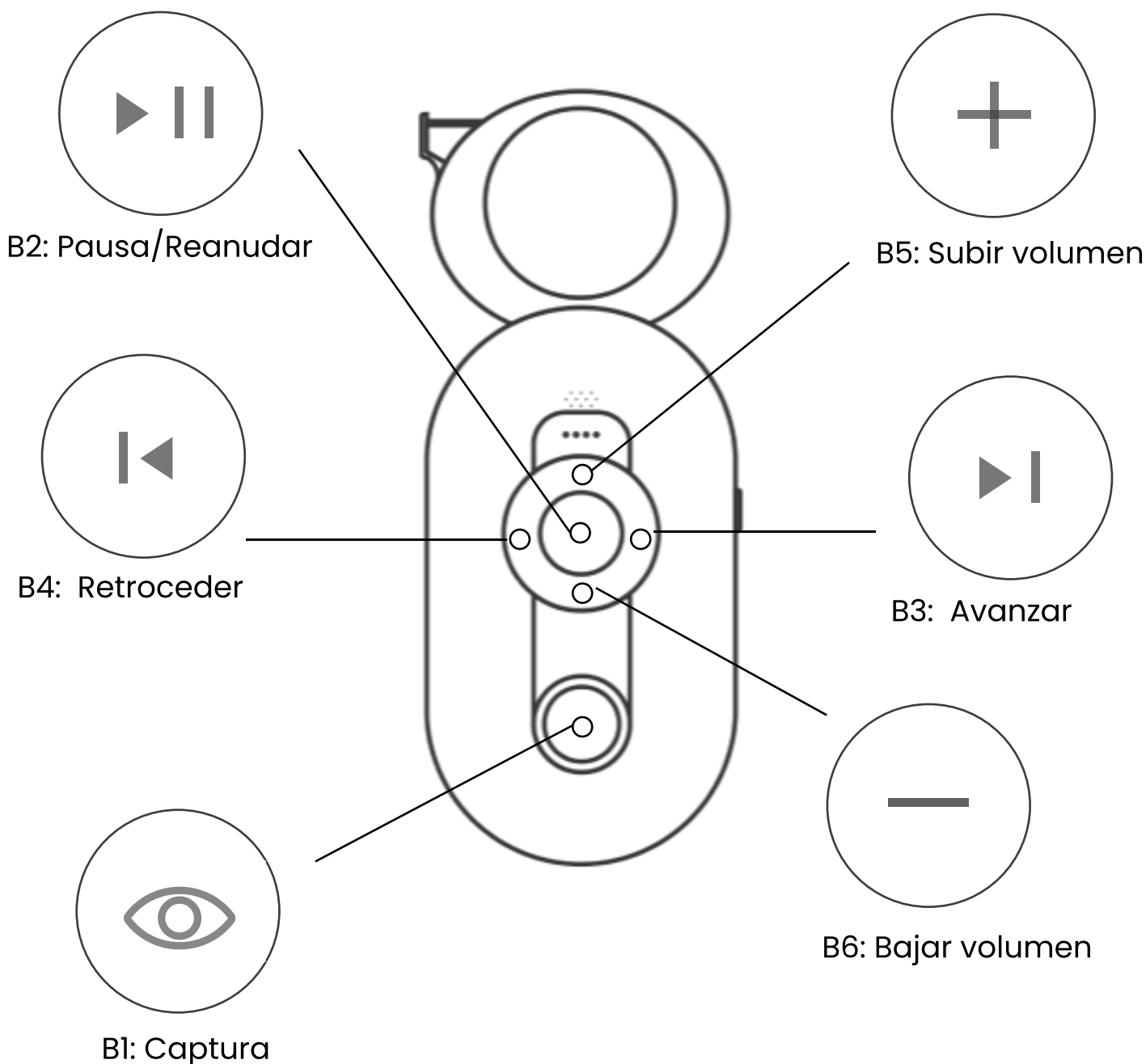

Descripción del producto

Pulsación larga

La lupa ostenta de 2 modos de funcionamiento: la corta y la larga. Mediante la pulsación se pueden ejecutar diferentes acciones en ella. En este apartado, se explican las acciones posibles a realizar mediante la pulsación larga.

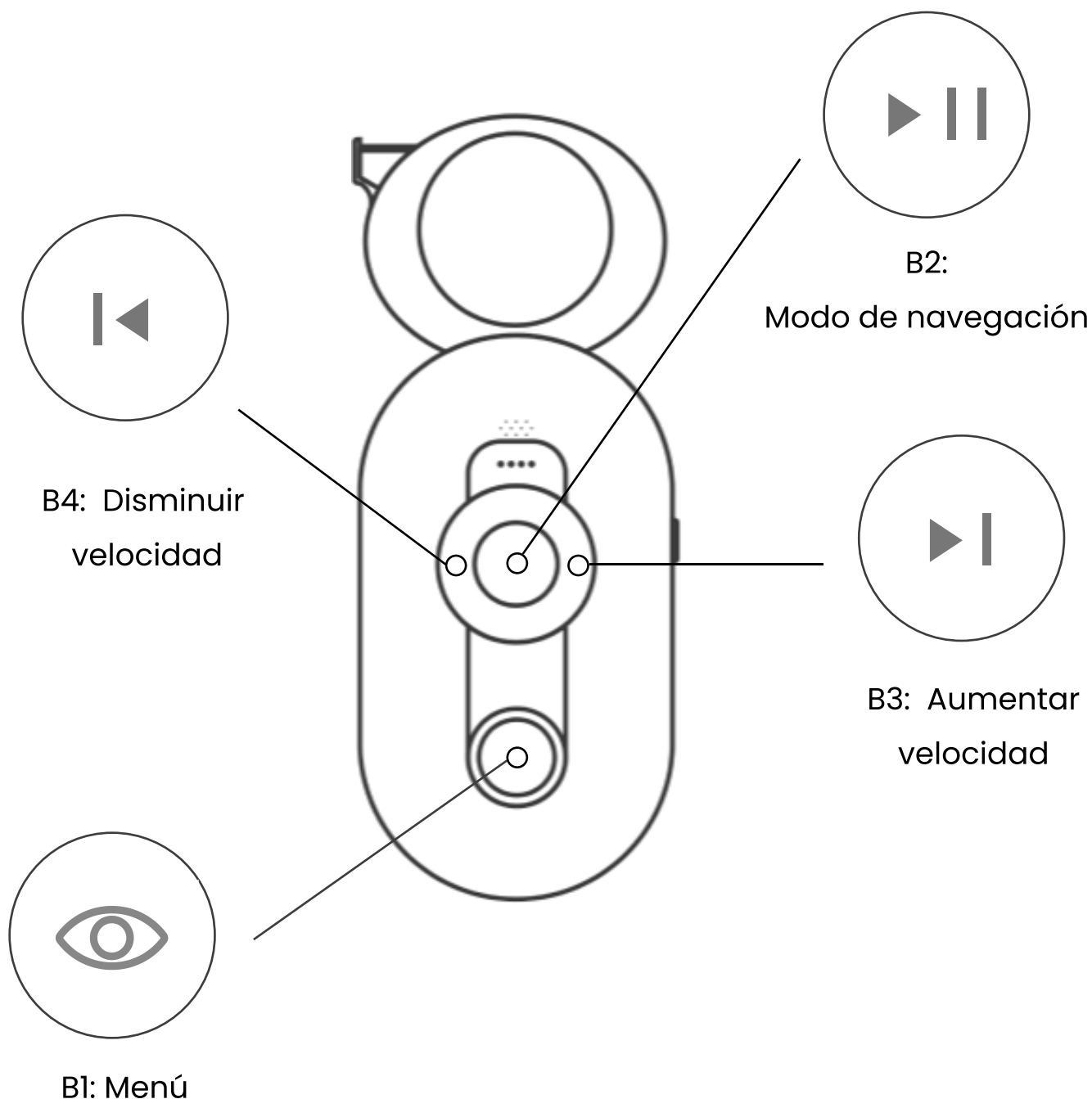

Asistente de captura

El asistente de captura integrada en la Lupa Inteligente emite sonidos cuando detecta texto mientras se desliza sobre una superficie. Se podrá activar desde el menú como se explica previamente. Cuando el dispositivo pasaba por encima de un texto, el dispositivo emitía un sonido si no existe texto no se emitirá ningún sonido. Esto permitirá identificar la ubicación del texto.

Traducción


El modo traducción de La Lupa te permitirá traducir textos en cualquier idioma al idioma establecido en el sistema. Ejemplo: Si el sistema está configurado en Castellano, los textos que se capturen en otros idiomas mientras se esté en el modo traducción, se leerán en Castellano.

Para activar el modo traducción se deberá acudir al menú como se explica previamente.

Lupa convencional


La Lupa Inteligente a continuación (dispositivo) incorpora también una lupa convencional, a partir de ahora (lente), con el que el usuario podrá seguir utilizando el resto visual. Para hacer uso de la lente de aumento tira de la pestaña del lado derecho de la lupa. La lente es de x10 aumentos.

Pestaña lateral

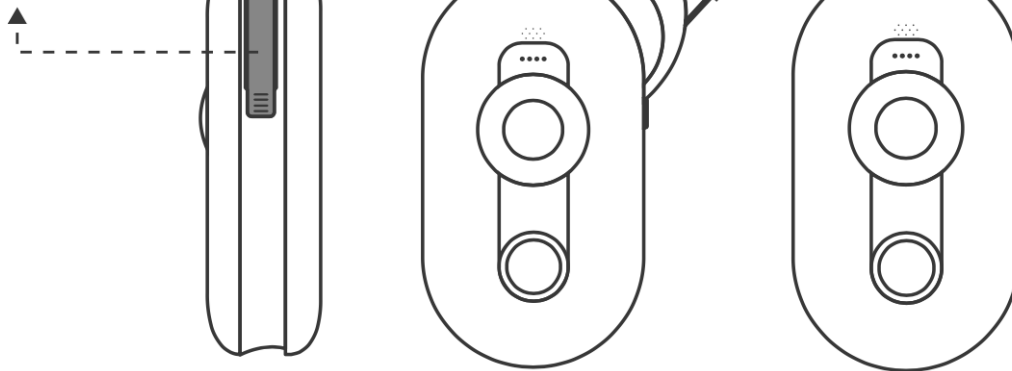


Carga de batería

Para cargar la batería del dispositivo inteligente deberá unir el cable que encontrará en la caja al cabezal que también encontrará en la caja. Conecta el cable al dispositivo y enchufa el cabezal a la toma de corriente.

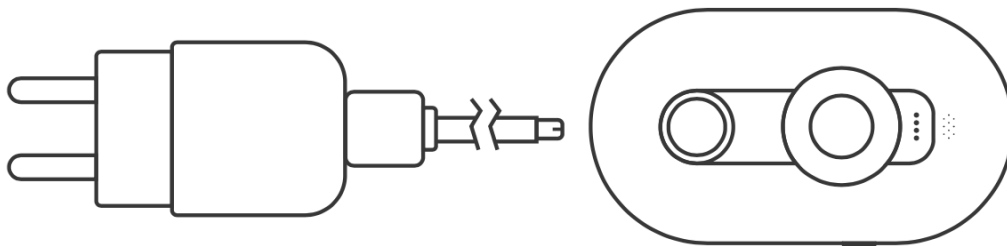


Los puntos que se encuentran en la parte superior del dispositivo indicaran el nivel de batería. Una luz siendo batería baja y cuatro puntos de luz siendo batería totalmente cargada.

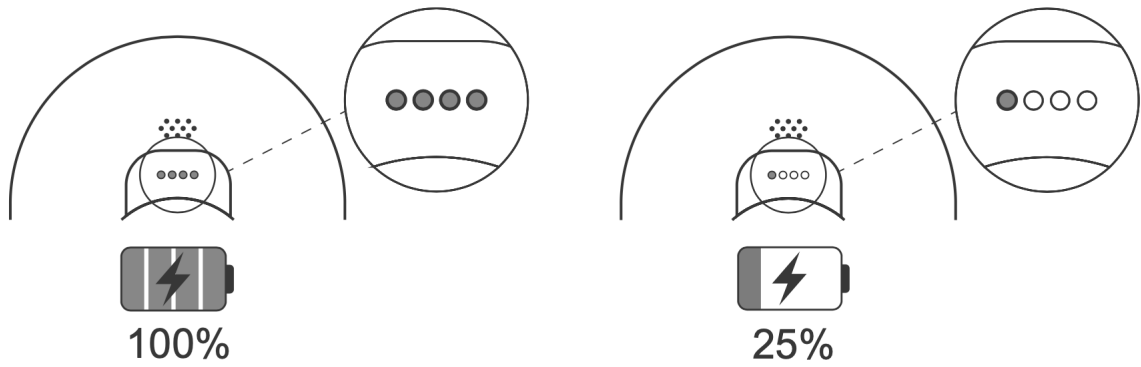

Puesta en marcha


Encender

Para encender el dispositivo pulsa el botón de captura (B1) manteniéndolo durante cinco segundos. Las luces superiores te indicarán que este encendido. Seguido deberá sonar la siguiente frase "listo para capturar".

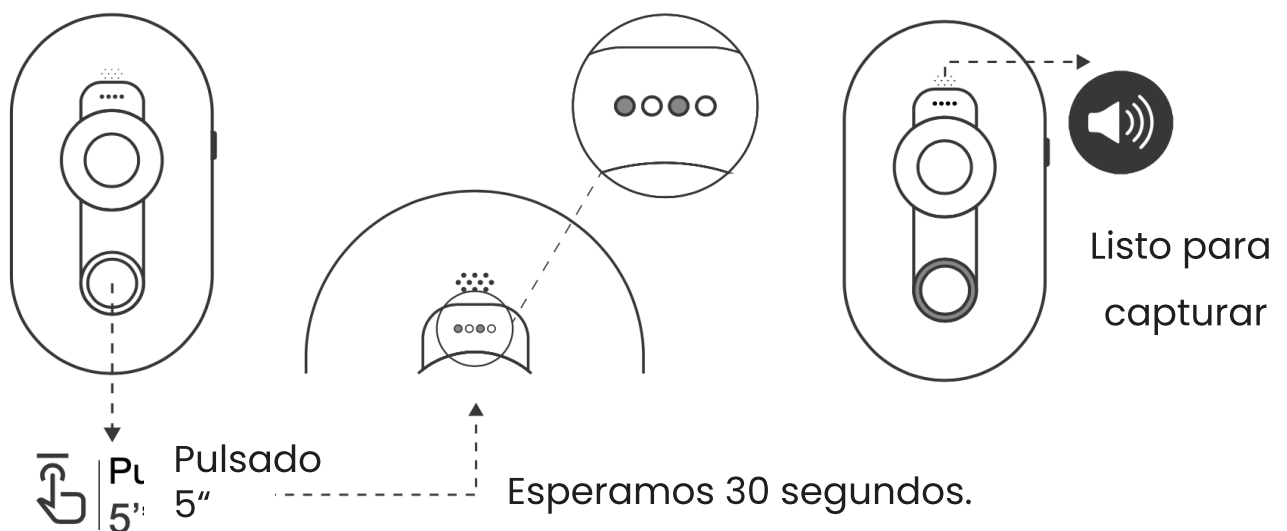

Capturar

Posiciona la lupa enfrente del texto y pulsa el botón de captura (B1). Seguido, el dispositivo emitirá un sonido de captura, seguido un pitido de “check”. Espera hasta el segundo pitido para retirar el dispositivo y escuchar el texto.

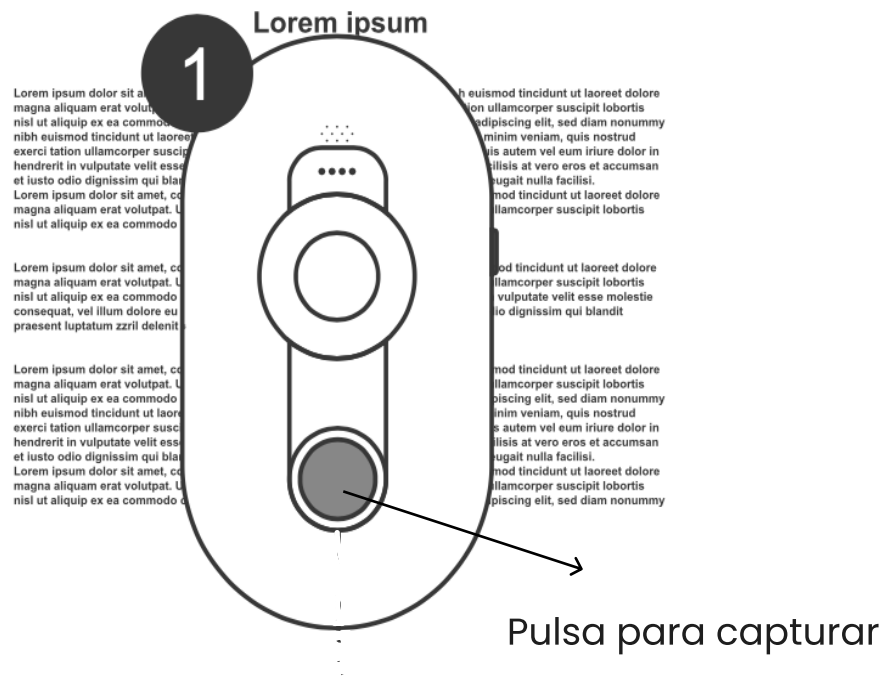


Información de seguridad

- No intentar desarmar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sea el original de LUP, incluido en la caja.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permiten dispositivos inalámbricos.
- Mantener el dispositivo alejado del agua, fuego, polvo, humedad o ambientes calientes.
- No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

Garantía límite

Lup garantiza que este dispositivo esté libre de defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de garantía. Esta garantía es limitada e intransferible, es solo para usted, el primer comprador usuario final. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra y tiene una duración 2 años para productos adquiridos en el continente europeo.

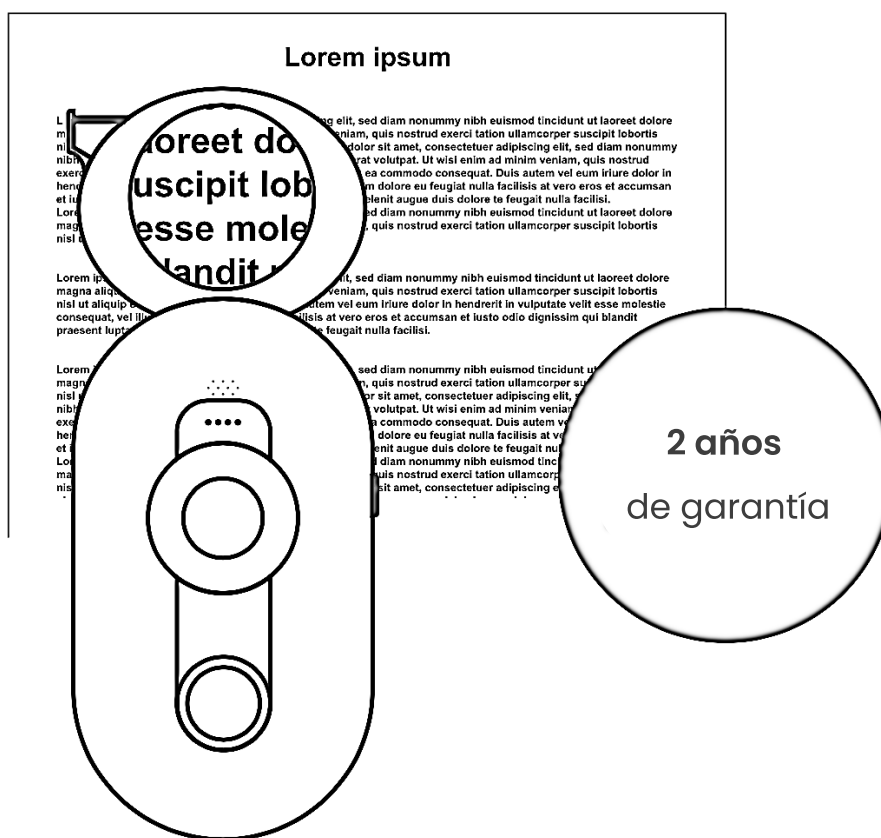

LUP

Lup S.Coop Txikia, Paseo Miramon 170 3º,
20014, San Sebastian, Spain



www.lup.es © 2025
Lup S.Coop. All rights reserved.





www.lup.es